

Durchführung des Corona-Schnelltests:

1. Folgende Dinge werden benötigt:



2. Vorbereitung:

- Testkassette auspacken (rechteckiges Päckchen)
- Buffer Tube (Röhrchen mit Flüssigkeit) öffnen und vorsichtig auf den Tisch legen, so dass die Flüssigkeit nicht ausläuft!
- Verpackung des Wattetupfers (langer Stab) öffnen.



3. Wattetupfer senkrecht zwischen Zeigefinger und Daumen nehmen.
4. Bei geöffneten Fenstern ziehen die Schüler*innen ihre Masken runter (der Tupfer darf nicht auf dem Tisch abgelegt werden).
5. Wattetupfer senkrecht in das erste Nasenloch einführen (bis man einen Widerstand spürt und es unangenehm wird). 4-5 mal zwischen Daumen und Zeigefinger hin- und herdrehen.
6. Wattetupfer in das andere Nasenloch einführen und wieder 4-5 mal drehen.
7. Schüler*innen ziehen ihre Masken wieder hoch.
8. Buffer Tube in die andere Hand nehmen, Wattetupfer in die Flüssigkeit stecken und mehrfach drehen (ca. 1 Minute).
9. Wattetupfer anheben, sodass er nicht mehr in der Flüssigkeit ist. Buffer Tube mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, so dass der Wattetupfer ausgedrückt wird.
10. Wattetupfer zur Seite legen.
11. Käppchen an der Spitze anfassen und Buffer Tube damit verschließen (die Spitze des Käppchens zeigt nach oben, nicht in die Flüssigkeit).
12. Testkassette vor sich legen, Buffer Tube leicht zusammendrücken, so dass 5 Tropfen in die rechte ovale Öffnung tropfen.
13. Nach kurzer Zeit sollte sich das Feld in der Mitte von rechts nach links hell lila verfärben und wenn es am C vorbeigelaufen ist, sollte dort ein lila-/pinkfarbener Strich erscheinen.
14. Frühestens nach 15 Minuten ablesen. Sollte ein zweiter Strich erscheinen (egal wie schwach):
Ist der Test positiv? ⇨ Schüler*in ruft über sein/ihr Handy zu Hause an (geht nicht ins Sekretariat). Er/sie muss auf dem Schulhof auf die Abholung durch die Eltern warten und einen PCR-Test beim Hausarzt durchführen lassen.